

Electroterapia con el NexWave™

Los beneficios de la electroterapia como un enfoque conservador de tratamiento para el dolor crónico y agudo es más importante que nunca. Considere esta opción para otras terapias no invasivas.

NexWave™

La ola del futuro en el tratamiento del dolor

- Disminuir el dolor crónico
- Aumentar la actividad diaria
- Mejorar la función muscular
- ¡Utilizar en el hogar, el trabajo, sobre la marcha!
- Control seguro y efectivo del dolor

Asistencia al paciente de Zynex

Zynex facturará a su compañía de seguro médico por el alquiler y / o compra del dispositivo NexWave. Los suministros mensuales le serán enviados y facturados a su compañía de seguros. Dependiendo de su cobertura de seguro, es posible que deba pagar un deducible y / o coseguro no cubierto.

Si se solicita, devuelva el dispositivo NexWave directamente a Zynex.

Comuníquese con Atención al paciente para:

- Soporte técnico de NexWave
- Preguntas sobre facturación
- Órdenes de suministro mensuales
- Cómo devolver su dispositivo


Contacta con nosotros

(800) 495-6670


Hecho en USA 

Referencia Rápida

Guía de colocación de electrodos

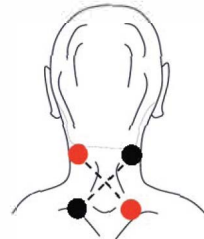

Cuello Cervical (IFC)

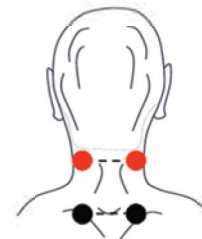

Cuello Cervical (TENS/NMES)



Rodilla Anterior (IFC)




Rodilla Lateral-Medial (IFC)




Hombro (IFC)



Hombro (TENS/NMES)

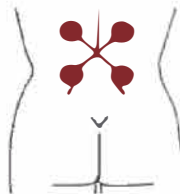

Espalda Lumbar (IFC)

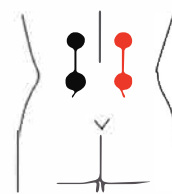

Espalda Lumbar (TENS/NMES)



Guía de inicio rápido

NexWave™



Ver videos instructivos:
www.zynex.com/nw



ZYNEX
MEDICAL

Paso 1

Abra el compartimento trasero y coloque la pila de 9V. Un adaptador de CA puede utilizarse en lugar de la batería.



Paso 2

Inserte los cables conductores grises y negros en la parte superior de la NexWave™. Alinee el lado plano de derivaciones con el lado plano del conector del dispositivo.




Paso 3

Presione el botón central para activar o desactivar el dispositivo.



Paso 4 - IFC

Pulse el botón inferior izquierdo "IFC" hasta que aparezca el modo deseado al ser indicado por la flecha.

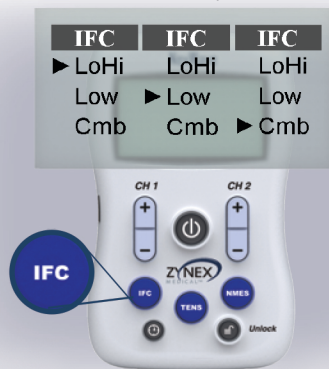


TENS

Pulse el botón medio bajo "TENS" hasta que el modo deseado sea señalado por la flecha.




NMES

Pulse el botón inferior derecho "NMES" hasta que el modo deseado sea señalado por la flecha.

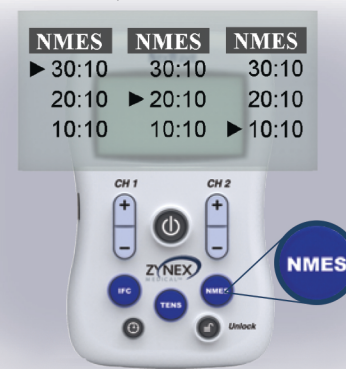

Paso 5

Rodee el área del dolor con cuatro electrodos, dos en cada canal. Cruce los cables rojos y negros de la IFC.

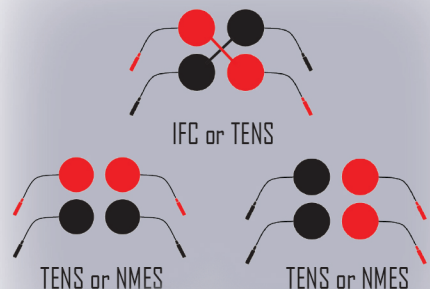

Paso 6

Presione el botón inferior izquierdo del temporizador hasta que alcance el tiempo de tratamiento deseado. Pulse el botón de desbloqueo para cambiar la configuración cuando el "icono de candado" aparece en pantalla.



Paso 7

Aumente la intensidad con la tecla positiva "+" a cada lado para una sensación fuerte, pero cómoda. Pulse el botón negativo "-" barra para disminuir la intensidad.

